


Hochlagerung bei Lagerungsbeginn

Wenn Sie nicht flach auf der Liegeorthese 18% liegen können legen Sie bitte z.B. ein Buch unterhalb des Rückenteiles im Kopfbereich ein sodaß ein entspanntes Liegen zu Beginn der Therapie möglich ist.

Die Höhe der Unterlage wird von Lagerung zu Lagerung reduziert bis der HWS-Bereich normalisiert ist, und der Proband wieder flach liegen kann.

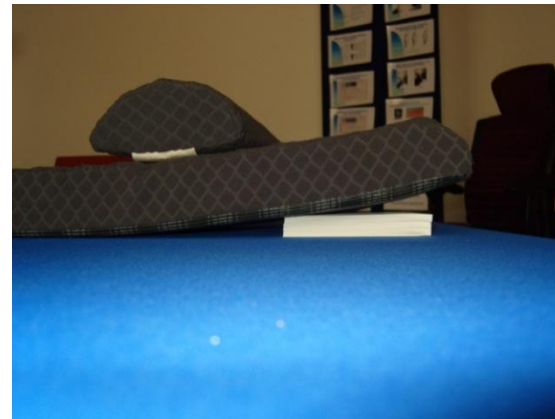

Bei einigen Erwachsenen ist es notwendig anstelle des regulär der Liegeorthese 18% beigestellten Cervikalsupports (FCS H2 = 150gr Streckung) den um 25% kleineren FCS H0s (60gr Streckung) bei den ersten 10 bis 20 Lagerungen zu verwenden.